

Kontaktní™ kojící kloboučky

Důležité upozornění

Před použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny

- Používejte výrobek výlučně k uvedenému účelu.
- Kontaktní kojící kloboučky jsou určeny k použití pouze jednou maminkou. Bez předchozí důkladné sterilizace nesmí být použity jinou maminkou, aby nedošlo ke křížové kontaminaci.
- Obratě se na laktiční poradkyni, porodní asistentku nebo ošetřujícího lékaře.
- Před každým použitím zkонтrolujte a v případě opotřebení nebo poškození vyměňte.

ULOŽTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ NA DOSAŽITELNÉ MÍSTO

Návod k použití

- Před použitím výrobku si důkladně umyjte ruce.
- Opatrně omyjte prs teplou vodou a zlehka osušte.
- K omytí prsu nepoužívejte mýdlo nebo prostředky obsahující alkohol, které pokožku vysušují a způsobují praskání bradavek.
- Navlhčete kojící klobouček vodou, zvýší se tím jeho přilnavost k pokožce.

Vytlačte špičku kloboučku téměř naruby a uchopte pevně okraje kloboučku. Zakryjte otvory v kloboučku prostředníčkem a nasadte klobouček na střed bradavky. Prostředníček držte stále na otvorech a jemně přitahujte okraje kloboučku tak dlouho, dokud klobouček pohodlně nepřilne.

Vykrojená část kloboučku je prostor určený pro nos miminka, aby cítil teplo a vůni matčiny pokožky.

Při vybírání správné velikosti kloboučku je nutno zohlednit jak maminku, tak i miminko. Zvolte velikost kloboučku tak, aby přiléhal k bradavce volně a pohodlně. V případě nedonošených miminek je někdy vhodné použít menší velikost kloboučku, aby miminko uchopilo klobouček tak, aby jeho rty uchopily i velkou část dvorce. K dispozici jsou 3 velikosti kloboučků: S/16mm, M/20mm a L/24mm.

Čištění a hygiena

Důležité

- K čištění používejte kvalitní vodu.
- Vymyjte kloboučky bezprostředně po použití aby nedocházelo k zasychání zbytků mléka a předešlo se tak množení bakterií.

Čištění doma

Postupujte dle níže uvedeného návodu.

Před prvním použitím a jednou denně

- Kloboučky důkladně omyjte a vypláchněte.

• Vložte je do hrnce s vodou tak, aby byly celé ponořené.

• Přidáním kávové lžičky kyseliny citrónové předejdete usazování vodního kamene.

• Uveděte do varu a povařte 3-5 minut.

• Vyjměte kloboučky z vody.

• Osušte kloboučky zlehka čistou utěrkou.

Další možnosti čistění

• myť v horní příhrádce myčky na nádobí

• sterilizovat v Medela Quick Clean sáčcích do mikrovlnné trouby

• sterilizovat parou podle instrukcí výrobce sterilizátoru

Pozn.: Po čase může dojít ke změně barvy materiálu kloboučku, což ale nemá vliv na správnou funkci výrobku.

Po každém použití

- Umyjte pečlivě kloboučky v teplé jarové vodě, zbavte je usazeného mléka.

• Důkladně vypláchněte čistou vodou!

Čištění v nemocnici

Následující doporučení výrobce mohou být přizpůsobeny individuálním čistícím praktikám v dané nemocnici.

Důležité

Doporučuje se přidělit každé maminec její vlastní kontaktní kloboučky. Před prvním použitím musí být kontaktní kloboučky sterilizovány. Před použitím jinou maminkou musí být vyčištěny, dezinfikovány a sterilizovány (např. v autoklávu). Použití kloboučku více než jednou maminkou, bez předešlé důkladné sterilizace, nese s sebou různá zdravotní rizika, např. křížovou kontaminaci.

Čištění

Umyjte pečlivě kloboučky v teplé jarové vodě. Důkladně vypláchněte čistou vodou!

Desinfekce

Desinfikujte v desinfektoru (při teplotě přibližně 93°C)

Sterilizace

Před sterilizací prohlédněte kloboučky, zda jsou opláchnuty a zbaveny usazeného mléka. Sterilizujte v autoklávu při teplotě 134°C po dobu 3 minut nebo při teplotě 125°C po dobu 15 - 20 minut. Nepokládejte kloboučky na sebe. Předejte tak působení vnějšího tlaku a jejich poškození.

Ochranný obal – pouzdro

Po vyčištění, pokud se kloboučky nepoužívají, je uložte do ochranného pouzdra.

Čištění ochranného pouzdra doma

Ochranné pouzdro je možno:

- myť v horní příhrádce myčky na nádobí
- sterilizovat v Medela Quick Clean sáčcích do mikrovlnné trouby
- sterilizovat parou podle instrukcí výrobce

Čištění ochranného pouzdra v nemocnici

Umyjte pečlivě ochranné pouzdro v teplé jarové vodě. Desinfikujte v desinfektoru (při teplotě přibližně 93°C)

Směrnice

Místní předpisy

CE značka dle 93/42/EEC



0123