


SURE sense®

Univerzális mikrochip olvasó

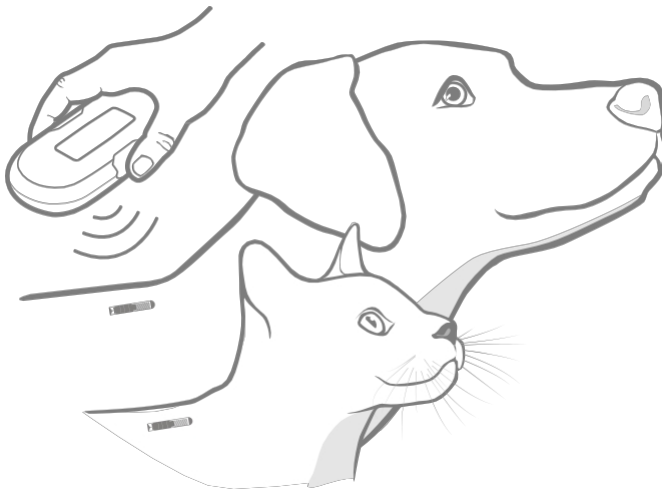

HU: Felhasználói kézikönyv

1 - 8

Bemutatkozás az új univerzális Mikrochip olvasó

Az univerzális mikrocsip-olvasó könnyű, ergonomikus kialakítású és egygombos működtetése bárki számára könnyen használható. Az olvasó kompakt kialakításának köszönhetően könnyen tartható egy kézben, miközben beolvassa a háziállat mikrochipjét.

A mikrochip-olvasó kompatibilis a szokásos mikrochiptípusokkal, beleértve a hőmérséklet-érzékelő mikrochipeket is. Ez azt jelenti, hogy az állat egyedi mikrochipszámának megjelenítése mellett az olvasó az állat belső mikrochip-hőmérsékletét is megjeleníti, ha hőmérsékletérzékelő mikrochip van jelen.

Termék áttekintés

Mi van a dobozban?

Ellenőrizze, hogy az alábbi alkatrészek mindegyike megvan-e

1 Mikrochip olvasó



USB kábel



2 (csak firmware-frissítésekhez)



Két 1,5 V-os AA alkáli elemet igényel (nem tartozék).

1



LCD kijelző

Akkum
ulátörrekesz a
hátsó oldalon

Gomb

USB-port
(csak firmware-frissítésekhez)

2



(Csak firmware-frissítésekhez, nem
töltéshez)

Tartalomjegyzék

Fontos információk.....	3
Műszaki specifikációk	3
Kompatibilis mikrochipek.....	4
Akkumulátorok és áramellátás.....	4
Hogyan kell beolvasni a háziállat mikrochipjét?.....	5
LCD kijelző	6
A hőmérséklet mértékegységének váltása °C & °F között.....	6
Firmware frissítések	6
Hibaelhárítás	6
Jótállás és jogi nyilatkozat	6
Szabályozási információk.....	6



Fontos információk



KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓKAT, ÉS ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

- A sorozatszámot az elemtartóban találja.
- Kérjük, győződjön meg róla, hogy az **1. oldalon** felsorolt összes alkatrész rendelkezésre áll.
- Kizárólag a mellékelt USB-kábelt használja a firmware-frissítésekhez. **Ne próbálja azt az olvasó tápellátására vagy töltésére használni.**
- **Ne helyezzen idegen tárgyakat a termékbe.**
- Ez a termék **nem vízálló.**
- Az olvasó két **1,5 V-os AA alkáli elemet igényel**, amelyeket óvatosan kell behelyezni és cserélni. **Ne keverje a különböző típusú elemeket, illetve az új és használt elemeket.** Ha a készüléket hosszabb ideig **nem használják, kérjük, vegye ki az elemeket.** Ezt a terméket **NEM újratölthető elemekkel való használatra tervezték.**



Biztonsági figyelmeztetések

- Ez a termék RFID-t (rádiófrekvenciás azonosítás) használ, ezért **1 méteres (3 láb) sugarú körben problémákat okozhat az érzékeny elektronikus orvosi eszközökkel, például a pacemakerekkel és monitorokkal.**
- **Ne használja a terméket, ha alkatrészek hiányoznak, sérültek vagy kopottak.**
- **Tartsa az apró alkatrészeket gyermekek és állatok elől elzárva.** Gyermekek nem játszhatnak az univerzális mikrocsip-olvasóval. Ez nem játék, és nem szabad úgy kezelni. Az univerzális mikrochip-leolvasót azonban 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak.
- **A hevedert tartsa távol a gyermekektől és a háziállatoktól a lehetséges fojtási veszélyek miatt.**



Műszaki adatok

Méret:

5 3/8" (L) x 2 7/16" (W) x 1 1/8" (H)
(136mm x 61mm x 31mm)

Az akkumulátor élettartama:

6 hónap + (jó minőségű 1,5 V-os AA alkáli elemekkel)

Leolvasható hőmérsékleti tartomány:

+33°C és +43°C (+91,4°F és +109°F) között.

Ha a mikrochip hőmérséklete nem esik ebbe a tartományba, akkor egy tartományon kívüli szimbólum jelenik meg, lásd a **6. oldalt**.

Maximális olvasási távolság:

Legfeljebb 95 mm (3 3/4") távolságra a mikrocsiptől, a mikrocsip típusától és tájolásától függően.

Tárolási hőmérséklet:

-10°C és +70°C között (+14°F és +158°F között)

Üzemi hőmérséklet:

-5°C és +55°C között (+23°F és +131°F között)

Működési frekvencia:

125 kHz és 134 kHz (RFID)



Kompatibilis mikrochipek

Ez egy univerzális mikrochip olvasó, amely a következő mikrochip típusokat tudja olvasni:

- FDX-A Nem ISO mikrochipek
- FDX-B 15 számjegyű mikrochipek
- Trovan mikrochipek
- Avid mikrochipek
- Thermochip

Mik azok a hőmérséklet-érzékelő mikrochipek?

A hőmérséklet-érzékelő mikrochipek elsősorban azonosító mikrochipek, amelyek kompatibilisek az ISO 11784/11785 és az univerzális olvasókkal. Ugyanakkor tartalmaznak egy hőmérséklet-bioszenzort is, amely képes mérni az állat hőmérsékletét a beültetés helyén.

A hőmérséklet-érzékelő mikrochipek nem invazív módon, stressz okozása nélkül, gyakran mérik a háziállatok hőmérsékletét. Több, egymás után végzett méréssel megállapítható az állat egyéni profiljának vagy átlaghőmérsékletének és ingadozásának tendenciája. Az ettől a tendenciától való atipikus eltérések az állat közérzetében bekövetkező változásokra utalhatnak.

A mikrochip hőmérséklete nem helyettesíti a rektális hőmérsékletet, és nem is szabad úgy értelmezni. A Microchip Temperature és a rektális hőmérséklet nem egyenértékűek, és nem várható el, hogy azonos értékeket mutassanak.

Ha egy hőmérséklet-érzékelő mikrochippelellátott állatot az univerzális mikrochip-olvasóval beolvasnak, a mikrochip belső hőmérséklete a mikrochip száma mellett az LCD-képernyőn is látható lesz. **Lásd a 6. oldalt.**




Akkumulátorok és tápegységek

Az elemek behelyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket.




1 Vegye le az elemfedelelet a nyíl megnyomásával és csúsztassa el a közepétől.

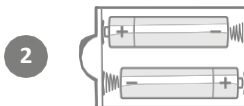

2 Helyezze az elemeket az elemtartó rekesz belsejében lévő ábrán látható polaritásjelzéseknek megfelelően.

Az olvasó bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg egyszer a gombot. Ha a gombot újra megnyomja, akkor a mikrochip leolvasása aktiválódik. Az olvasó automatikusan kikapcsol, miután befejezte a használatát.

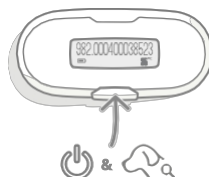


Ez az ikon jelenik meg, amikor az akkumulátorok kezd lemerülni. Mindig **2 jó minőségű, 1,5 V-os AA alkáli elemet** használjon.



Hogyan kell beolvasni a mikrochipet?

1

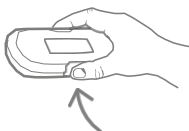

Helyezze be az elemeket a 4. oldalon található utasításoknak megfelelően. Nyomja meg az olvasón lévő gombot (a jelzett módon) a bekapcsoláshoz. Amikor nem használja, automatikusan kikapcsol.

2



Nyomja meg újra a gombot, az olvasó a gomb megnyomása után körülbelül 12 másodpercig szkennel, és tartja a kapcsolatot az állat testével. LASSAN mozgassa az olvasót az alább látható ajánlott letapogatási mintákat követve.


3



Amikor az olvasó érzékeli a mikrochipet, a szám megjelenik az LCD-képernyőn, és **egyszer rezegve** jelzi, hogy a leolvasás sikeres volt. (A mikrocsip hőmérsékletét is megjeleníti, ha az állat hőmérsékletérzékelő mikrocsippel rendelkezik).




A mikrocsip leolvasása körülbelül 15 másodperc után leáll, ha az olvasó **nem tud mikrocsipet érzékelni**. Az LCD-képernyőn egy sor X jelenik meg (a 6. oldalon látható módon), és **kétszer rezegve** jelzi, hogy a leolvasás sikertelen volt.

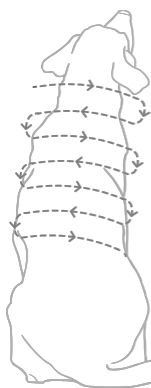

Szkennelési minta 1

Lassan, oldalról oldalra haladva az állat testén keresztül.

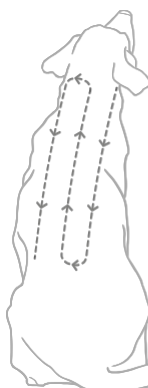

Szkennelési minta 2

Lassan fel és le az állat testén.



A mikrochipeket általában a nyak bal oldalán vagy az állat lapockái között helyezik el. A mikrochip elhelyezése állatonként eltérő lehet.



LCD kijelző

Az olvasó standard kijelzője a következő:

Az állat mikrochipszáma



Az akkumulátor
töltöttségi szintjének
kijelzője

Mikrochip hőmérséklet

(csak hőmérséklet-érzékelő mikrochipek esetében)

Az alábbi ikonok egyike helyettesíti a hőmérséklet-értéket, ha az a **tartományon kívül** esik:

A alatt.

33°C (91.4°F)




Fentebb

43°C (109°F)



Akkor jelenik meg, amikor az olvasó a háziállat mikrochipjét keresi.

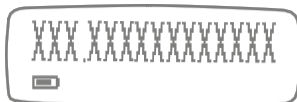

Ha nem talál chipet, a vizsgálat automatikusan leáll, és a chip száma egy sor X-ként jelenik meg. A gomb újbóli megnyomásával egy újabb keresés aktiválódik.




Akkor jelenik meg, amikor az akkumulátorok teljesen lemerültek. Új elemek behelyezéséhez lásd a 4. oldalt.



A hőmérséklet mértékegységének megváltoztatása °C & °F között


Az olvasó hőmérséklet-beállításának megváltoztatásához először vegye ki az elemeket. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva az olvasó gombját, miközben visszahelyezi az elemeket. A hőmérséklet most már Fahrenheitben fog megjelenni. Ha vissza szeretne térni a Celsius-értékre, ismételje meg a folyamatot.

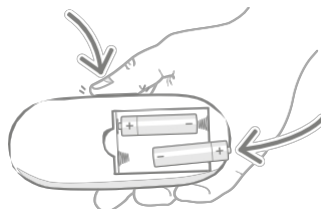



Firmware frissítések

Előfordulhat, hogy az olvasónak frissítésre van szüksége, hogy a lehető legfrissebb firmware-t futtassa.

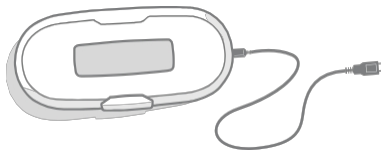

A mellékelt USB-kábel csak firmware-frissítésekre szolgál, töltésre és áramellátásra nem használható. Az összes firmware-frissítés felkerül a HomeAgain weboldalára, amint elérhetővé válik.



Hibaelhárítás

K: Az olvasó nem kapcsol be.

V: Győződjön meg róla, hogy az elemek a megfelelő irányban vannak behelyezve. Ha ez nem oldja meg a problémát, próbálja meg kicserélni az elemeket, a részleteket lásd a 4. oldalon.

K: Nem jelenik meg hőmérséklet.

V: Ha az olvasó csak a mikrochip számát jeleníti meg, az azt jelezheti, hogy az állat nem rendelkezik hőmérséklet-érzékelő chippel.

K: Az olvasó nem érzékeli az állat mikrochipjét.

V: Ez a következő okok valamelyikéből adódhat:

- Az állat mikrochipje **nem volt olvasható**. Az állat mikrochipjének megtalálási esélyeinek javítása érdekében győződjön meg róla, hogy lassan pásztázik, és folyamatosan megérinti az állat testét. Feltétlenül kövesse az 5. oldalon található szabványos szkennelési eljárásokat.
- Ha az akkumulátorok lemerülnek, az olvasónak nem biztos, hogy elegendő energiája van a sikeres leolvasáshoz. Próbálja meg kicserélni az elemeket, ne feledje, hogy új, **2 jó minőségű 1,5 V-os AA alkáli elemek** pótlására. Lásd a 4. oldalt.
- Egyes állatok egynél több mikrochippelel is rendelkezhetnek, ebben az esetben az egymáshoz közel beültetett mikrochipek befolyásolhatják az olvasó teljesítményét. Az egyik mikrochip leolvasásának esélyét úgy növelheti, hogy lassan szkenneljen, és folyamatosan érintse az állat testét. Feltétlenül kövesse az 5. oldalon részletezett utasításokat és szkennelési mintákat.
- **A fém zavarhatja a leolvasót**, próbálja meg háziállatát nagy fémtárgyaktól, például fémasztaltól távol szkennelni.



Jótállás és jogi nyilatkozat

Garancia: A SureSense mikrochip olvasóra a vásárlás dátumától számított 2 év garancia vonatkozik, a vásárlás dátumának igazolása esetén. A garancia az anyag-, alkatrész- vagy gyártási hiba által okozott hibákra korlátozódik. Ez a garancia nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyek meghibásodását a szokásos elhasználódás, a helytelen használat, a gondatlanság vagy a szándékos rongálás okozta.

Hibás alkatrész vagy megmunkálás miatti meghibásodás esetén az alkatrész cseréje kizárólag a jótállási időszak alatt ingyenes. Súlyosabb meghibásodás esetén a gyártó belátása szerint a termék cseréje díjmentesen történhet. Az Ön törvényes jogait ez nem érinti.

Jogi nyilatkozat: A SureSense Microchip Reader, beleértve a Microchip hőmérsékletének mérését is, nem helyettesíti a hagyományos állatorvosi tanácsadást. Ha úgy gondolja, hogy állatorvosi tanácsadásra van szüksége, vigye el kedvencét egy állatorvosi rendelőbe. Kifejezetten kizárunk minden felelősséget minden olyan veszteségért, kárért vagy költségért, amely a terméknek a szakszerű állatorvosi tanácsadás helyettesítésére történő használatából ered. Továbbá nem vállalunk felelősséget semmilyen állatorvosi díjért, amely a termék használata miatt merülhet fel.

A testhőmérséklet önmagában nem elegendő a betegség meghatározásához. A mikrochip hőmérséklete nem helyettesíti az állatorvos által végzett rektális hőmérsékletmérést, aki az egyetlen személy, aki alkalmas arra, hogy megállapítsa kedvence egészségi állapotát. A Mikrochip-hőmérséklet és a rektális hőmérséklet, bár korrelálnak, nem egyenértékűek, és nem szabad elvárni, hogy azonos értékeket mutassanak.

Szabályozási információ



A termékek és a használt elemek ártalmatlanítása: Ez az ikon azokat a termékeket jelzi, amelyekre a következő jogszabályok vonatkoznak:

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv (WEEE-irányelv) és az akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv és módosítása (2013/56/EU) kötelezi a háztartásokat, hogy a hulladék akkumulátorokat és az élettartamuk végét elért termékeket környezetileg felelős módon ártalmatlanítsák, mivel ez csökkenti a hulladék környezetre gyakorolt hatását, ezért ezeket nem lehet a háztartási hulladékgyűjtőkbe helyezni. és megfelelő újrahasznosító létesítményben kell újrahasznosítani. Az újrahasznosítással kapcsolatos további információk a következő weboldalon találhatók: www.recycle-more.co.uk.

Gondoskodjon arról, hogy az elemeket a csomagoláson vagy magán az elemen feltüntetett lejárati idő előtt kicserélje, és biztonságosan és megfelelően ártalmatlanítsa.

Az akkumulátorok szivárgása esetén viseljen megfelelő védőruházatot, hogy megvédje magát a káros vegyi anyagokkal való érintkezéstől, mielőtt az akkumulátorokat kidobja és a kiömlött folyadékot megtisztítja. A kiömlött folyadék eltakarításakor kerülje a bőrrel való érintkezést. Az akkumulátorok vegyi anyagai nem kerülhetnek a szem közelébe, és nem nyelhetők le. Ha ez mégis bekövetkezne, azonnal forduljon orvoshoz.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu