


SURE sense[®]

Universal Microchip Reader

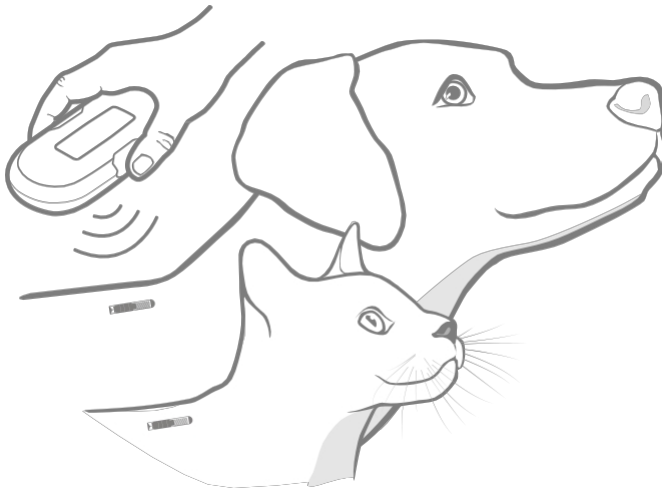

O introducere în noul dvs. Universal Microchip Reader

Cititorul universal de microcipuri are un design ușor și ergonomic și funcționează cu un singur buton, ceea ce îl face ușor de utilizat pentru oricine. Designul compact al cititorului este ușor de ținut într-o singură mână în timp ce scanați microcipul animalului dvs. de companie.

Cititorul de microcipuri este compatibil cu tipurile comune de microcipuri, inclusiv cu microcipurile cu senzor de temperatură. Aceasta înseamnă că, pe lângă afișarea numărului unic de microcip al unui animal, cititorul va afișa și temperatura internă a microcipului, dacă este prezent un microcip cu senzor de temperatură.

Prezentare generală a produsului

Ce este în cutie?


Verificați dacă aveți toate aceste piese

- ① Cititor de microcip

Cablu USB

- ② (numai pentru actualizările firmware)

Necesită două baterii alcaline AA de 1,5 V (nu sunt incluse)

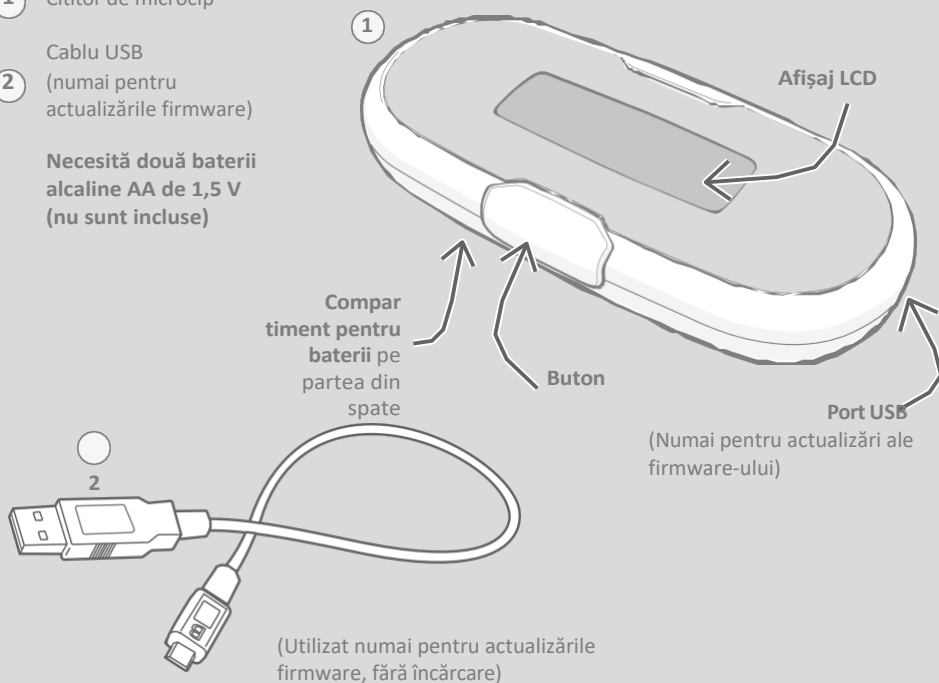

Cuprins

Informații importante.....	3
Specificații tehnice.....	3
Microcipuri compatibile	4
Baterii și alimentare	4
Cum să scanați microcipul unui animal de companie	5
Afișajul LCD.....	6
Schimbarea unității de temperatură între °C & °F	6
Actualizarea firmware-ului	7
Rezolvarea problemelor	7
Garanție și exonerare de răspundere	8
Informații de reglementare	8



Informații importante



VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTOARELE INFORMAȚII ȘI SĂ PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

- Puteți găsi **numărul de serie** în compartimentul bateriei.
- Vă rugăm să vă asigurați că aveți toate componentele enumerate **la pagina 1**.
- Utilizați numai cablul USB furnizat pentru actualizarea firmware-ului. **Nu încercați să îl utilizați pentru a alimenta sau încărca cititorul.**
- **Nu introduceți niciun obiect străin în produs.**
- Acest produs **nu** este **rezistent la apă**.
- Cititorul **necesită două baterii alcaline AA de 1,5 V**, care trebuie introduse și înlocuite cu precauție. **Nu amestecați diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate.** Dacă unitatea va fi **neutilizată** pentru o perioadă lungă de timp, **vă rugăm să scoateți bateriile.** Acest produs **NU** este proiectat pentru a fi utilizat cu **baterii reîncărcabile.**



Avertismente de siguranță

- Acest produs utilizează RFID (Radio Frequency Identification) și, prin urmare, poate cauza probleme cu dispozitivele medicale electronice sensibile, cum ar fi stimulatoarele cardiace și monitoarele, pe o rază de 1 metru (3 picioare).
- **Nu utilizați acest produs dacă lipsesc, sunt deteriorate sau uzate piese.**
- **Țineți piesele mici departe de copii și animale.** Copiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu cititorul universal de microcipuri. Acesta nu este o jucărie și nu trebuie tratat ca atare. Cu toate acestea, cititorul universal de microcipuri poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și, de asemenea, de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, atâta timp cât acestea sunt supravegheate.
- **Țineți curea departe de copii și de animalele de companie din cauza potențialelor pericole de strangulare.**



Specificații tehnice

Mărime:

5 3/8" (L) x 2 7/16" (I) x 1 1/8" (H)
(136mm x 61mm x 31mm)

Durata de viață a bateriei:

6 luni+ (cu baterii alcaline 1,5 V AA de bună calitate)

Interval de temperatură lizibilă:

+33° C la +43° C (+91,4° F la +109° F)
Dacă temperatura microcipului nu se încadrează în acest interval, va fi afișat un simbol de ieșire din interval, **consultați pagina 6**.

Distanța maximă de citire:

Până la 3 3/4" (95 mm) distanță de microcip, în funcție de tipul și orientarea microcipului.

Temperatura de depozitare:

-10° C la +70° C (+14° F la +158° F)

Temperatura de funcționare:

-5° C la +55° C (+23° F la +131° F)

Frecvența de funcționare:

125 kHz & 134 kHz (RFID)



Microcipuri compatibile

Acesta este un cititor universal de microcipuri care poate citi următoarele tipuri de microcipuri:

- FDX-A Microcipuri non-ISO
- Microcipuri FDX-B cu 15 cifre
- Microcipuri Trovan
- Microcipuri Avid
- Thermochip

Ce sunt microcipurile cu senzor de temperatură?

Microcipurile cu senzor de temperatură sunt în primul rând microcipuri de identificare, compatibile cu ISO 11784/11785 și cu cititoarele universale. Cu toate acestea, ele încorporează și un biosenzor de temperatură, capabil să măsoare temperatura unui animal la locul de implantare.

Microcipurile cu senzor de temperatură sunt o modalitate neinvazivă de măsurare frecventă a temperaturii unui animal de companie, fără a-i provoca stres. Măsurătorile multiple efectuate consecutiv pot stabili o tendință a profilului individual al animalului sau a temperaturii medii și a variabilității. Variațiile atipice ale acestei tendințe pot indica schimbări în starea de bine a animalului.

Temperatura microcipului nu înlocuiește temperatura rectală și nu trebuie interpretată ca atare. Temperatura microcipului și temperatura rectală nu sunt echivalente și nu trebuie să se aștepte să prezinte valori identice.

Dacă un animal cu microcip cu senzor de temperatură este scanat cu cititorul universal de microcipuri, temperatura internă a microcipului va fi vizibilă pe ecranul LCD, alături de numărul microcipului. **A se vedea pagina 6.**



Baterii și alimentare


Pentru a introduce bateriile, vă rugăm să urmați pașii de mai jos.

1




Scoateți capacul bateriei apăsând săgeata și glisându-l în afară din centru.

2

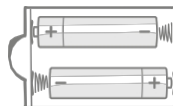

Așezați bateriile în conformitate cu indicatorii de polaritate de pe diagramă în interiorul compartimentului pentru baterii.

Pentru a porni cititorul, pur și simplu apăsați butonul o dată. Dacă butonul este apăsat din nou, acesta va activa o scanare a microcipului. Cititorul se va opri automat după ce ați terminat să-l utilizați.

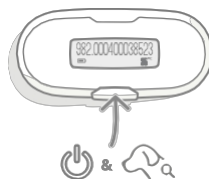


Această pictogramă va fi afișată atunci când bateriile încep să se descarce. Utilizați întotdeauna **2 baterii alcaline AA de 1,5 V de bună calitate.**



Cum să scanați microcipul al unui animal de companie

1

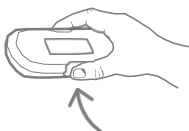

Introduceți bateriile conform instrucțiunilor de la pagina 4. Apăsați butonul de pe cititor (așa cum este indicat) pentru a-l porni. Acesta se va opri automat atunci când nu este utilizat.

2



Apăsați din nou butonul, cititorul scanează timp de aproximativ 12 secunde după ce ați apăsut butonul și menține contactul cu corpul animalului. Deplasați cititorul LENT, urmând modelele de scanare recomandate indicate mai jos.


3



Atunci când cititorul detectează un microcip, numărul va apărea pe ecranul LCD și **va vibra o dată** pentru a vă anunța că citirea a avut succes. (Se va afișa, de asemenea, temperatura microcipului dacă animalul are un microcip care detectează temperatura).




O scanare a microcipului se va opri după aproximativ 15 secunde dacă cititorul **nu poate detecta un microcip**. Ecranul LCD va afișa o serie de X-uri (după cum se arată la pagina 6) și **va vibra de două ori** pentru a vă anunța că scanarea nu a avut succes.

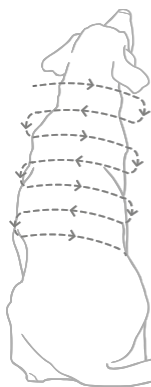


Model de scanare 1

De la o parte la alta, încet pe corpul animalului

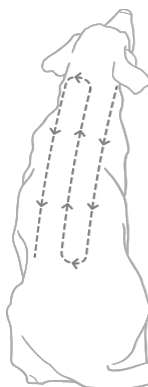

Model de scanare 2

În sus și în jos încet pe corpul animalului

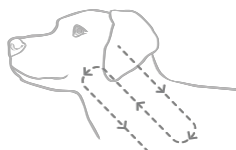

Microcipurile sunt amplasate în mod normal pe partea stângă a gâtului sau între o m o p l a ț i i animalului. Plasarea microcipului poate varia în funcție de animal.



Afișaj LCD

Afișajul standard pentru cititor este:

Numărul microcipului animalului

→ 985.141000555345
← 38°C

Indicator al nivelului
bateriei

Temperatura microcipului

(numai pentru microcipurile cu senzor de temperatură)

Una dintre pictogramele de mai jos va înlocui citirea temperaturii dacă aceasta este **în afara intervalului**:


Sub
33°C (91,4°F)



Peste
43°C (109°F)



Afișat atunci când cititorul caută microcipul animalului de companie.

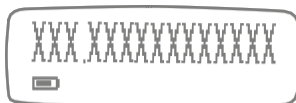

Scanarea se va opri automat dacă nu este găsit niciun cip, iar numărul cipului va fi afișat ca o serie de X. Apăsarea din nou a butonului va activa o nouă scanare.




Se afișează atunci când **bateriile sunt complet descărcate**. Pentru a introduce baterii noi, consultați pagina 4.



Schimbarea unității de temperatură între °C și °F


Pentru a schimba setarea de temperatură a cititorului, scoateți mai întâi bateriile. Apoi apăsați și mențineți apăsat butonul cititorului în timp ce introduceți din nou bateriile. Temperatura va fi afișată acum în Fahrenheit. Pentru a reveni la Celsius, repetați procesul.

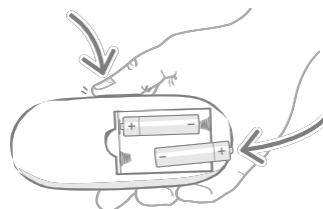



Actualizări ale firmware-ului

Ocazional, cititorul dvs. poate necesita o actualizare pentru a vă asigura că rulează cel mai recent firmware posibil.

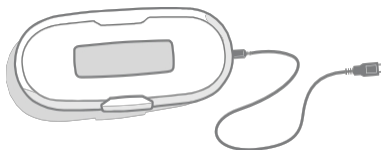

Cablul USB furnizat este doar pentru actualizările de firmware și nu poate fi utilizat pentru încărcare și alimentare. Toate actualizările de firmware vor fi listate pe site-ul HomeAgain imediat ce devin disponibile.



Rezolvarea problemelor

Î: Cititorul nu pornește.

R: Asigurați-vă că bateriile sunt introduse în orientarea corectă. Dacă acest lucru nu rezolvă problema, încercați să schimbați bateriile, consultați pagina 4 pentru detalii.

Î: Nu este afișată nicio temperatură.

R: Dacă cititorul afișează doar numărul microcipului, acest lucru poate indica faptul că animalul nu are un cip care să detecteze temperatura.

Î: Cititorul nu detectează microcipul animalului.

R: Acest lucru poate fi rezultatul uneia dintre următoarele situații:

- Microcipul animalului a **ieșit din raza de citire**. Pentru a vă spori șansele de a localiza microcipul unui animal, asigurați-vă că scanați încet și atingeți în continuare corpul animalului. Asigurați-vă că urmați procedurile standard de scanare de la pagina 5.
- Dacă bateriile sunt descărcate, este posibil ca cititorul să nu aibă suficientă energie pentru a finaliza o scanare cu succes. Încercați să înlocuiți bateriile, reamintindu-vă să utilizați baterii noi, **2 de bună calitate alcaline AA de 1,5 V**, de bună calitate, ca înlocuitori. Consultați pagina 4.
- Unele animale pot avea mai mult de un microcip; în acest caz, microcipurile implantate aproape unul de celălalt ar putea afecta performanța cititorului. Pentru a vă îmbunătăți șansele de a citi unul dintre microcipuri, asigurați-vă că scanați încet și continuați să atingeți corpul animalului. Asigurați-vă că urmați instrucțiunile și modelele de scanare detaliate la pagina 5.
- **Metalul poate interfera cu cititorul**, încercați să vă scanați animalul departe de obiecte metalice mari, cum ar fi o masă metalică.



Garanție și exonerare de răspundere

Garanție: Cititorul de microcipuri SureSense are o garanție de 2 ani de la data achiziției, sub rezerva dovezii datei achiziției. Garanția este limitată la orice defect cauzat de materiale, componente sau fabricație defecte. Această garanție nu se aplică produselor al căror defect a fost cauzat de uzura normală, utilizare necorespunzătoare, neglijență sau deteriorare intenționată.

În cazul în care o piesă se defectează din cauza unor defecțiuni ale pieselor sau ale manoperei, piesa va fi înlocuită gratuit numai în perioada de garanție. La discreția producătorului, un produs de înlocuire poate fi furnizat gratuit în cazul unei defecțiuni mai grave. Drepturile dumneavoastră legale nu sunt afectate.

Disclaimer: cititorul de microcipuri SureSense, inclusiv utilizarea sa pentru măsurarea temperaturii microcipului, nu este destinat să înlocuiască consultanța veterinară tradițională. Dacă credeți că aveți nevoie de consiliere veterinară, trebuie să vă duceți animalul de companie la un cabinet veterinar. Declinăm în mod expres orice răspundere pentru pierderile, daunele sau costurile pe care le-ați putea suporta ca urmare a utilizării produsului ca substitut al consultanței veterinare profesionale. În plus, nu acceptăm nicio răspundere pentru taxele veterinare pe care le puteți suporta ca urmare a utilizării produsului.

Temperatura corpului nu este suficientă pentru a determina singură boala. Temperatura microcipului nu înlocuiește măsurarea temperaturii rectale de către un medic veterinar, care este singura persoană calificată pentru a determina starea de sănătate a animalului dumneavoastră. Temperatura microcipului și temperatura rectală, deși corelate, nu sunt echivalente și nu ar trebui să se aștepte să prezinte citiri identice.



Informații privind reglementările



Eliminarea produselor și a bateriilor folosite: Această pictogramă indică produsele care fac obiectul următoarei legislații:

Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice 2012/19/UE (Directiva DEEE) & Directiva privind bateriile 2006/66/CE și amendamentul 2013/56/UE impune gospodăriilor obligația de a elimina deșeurile de baterii și produse care au ajuns la sfârșitul duratei lor de viață într-un mod responsabil față de mediu, deoarece acest lucru va reduce impactul pe care deșeurile îl vor avea asupra mediului, prin urmare acestea nu pot fi introduse în pubelele de deșeuri menajere și trebuie reciclate la o instalație de reciclare adecvată. Informații suplimentare privind reciclarea pot fi găsite la: www.recycle-more.co.uk

Asigurați-vă că bateriile sunt înlocuite înainte de data de expirare indicată pe ambalaj sau pe bateria în sine și că sunt eliminate în siguranță și în mod corespunzător.

În cazul scurgerilor de baterii, purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată pentru a vă proteja de orice expunere la substanțe chimice nocive înainte de a arunca bateriile și de a curăța orice scurgere. Atunci când curățați o scurgere, evitați contactul cu pielea. Substanțele chimice ale bateriilor nu ar trebui să fie plasate în apropierea ochilor sau ingerate. Contactați imediat un profesionist medical dacă acest lucru se întâmplă.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@reedog.ro

