




Fabricant tchèque de respirateurs

Good mask GM2 respirateur FFP2

Code produit : GM2-FFP2

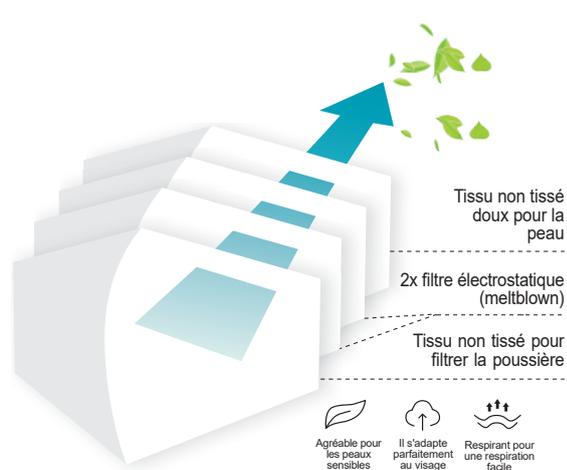

Respirateur de classe FFP2 conçu pour protéger son utilisateur en filtrant l'air inhalé et pour réduire le risque d'infection entre les personnes. L'efficacité de filtration est d'au moins 95%.

Il s'agit d'un dispositif médical selon la directive 93/42 / CEE et en même temps d'un dispositif de protection individuelle selon le règlement 2016/425. Le produit porte le marquage CE garantissant le respect des exigences de la législation applicable.

Propriété

Jetable
Agréable et confortable à porter
Couleur : blanche
Matériel : tissu non tissé
Classe de protection : FFP2
Degré de filtration : $\geq 95\%$
Taille : universelle

Emballage

10 pièces
50 pièces

Fabricant

GOOD MASK s.r.o.
Balbínova 529/1
12000 Prague 2



Fabriqué en République tchèque

Mode d'emploi



Ouvrez le respirateur

Utilisez un désinfectant à base d'alcool ou lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon avant d'utiliser le respirateur



Appliquez le respirateur sur le visage



Mettez les élastiques derrière les oreilles



Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites et appuyez autour du nez



www.goodmask.fr