



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.
Bezpečný a efektivní způsob čištění uší a odstranění ušního mazu!

OBSAH BALENÍ:



1 x elektrický čistič uší (hlavní jednotka)

2 x sací hlava

1 x čistící kartáč

1 x ochranný box

Specifikace:

Materiál: Plast, silikon

Zdroj napájení: Napájení na baterie 1 AAA (není součástí balení)

Velikost: Přibl. 11,5 X 5,5 X 3 cm

Vhodné pro děti i dospělé


VAROVÁNÍ

- Při používání se nedotýkejte žádných jiných osob nebo předmětů, sedněte si na bezpečném místě.
- Pokud je používají děti, prosím pod dozorem dospělé osoby.
- Při odstraňování mokrého ušního mazu zkontrolujte, zda není ucpané sání a filtr.
- Pokud je ušní bubínek poraněn, produkt prosím nepoužívejte.
- Pokud je ucho bolestivé nebo má jiná poranění, použijte jej po konzultaci s lékařem.
- Toto zařízení používejte pouze k tomu, k čemu je určeno.

POKYNY:



Poznámka: Zapněte přístroj a poté, co uslyšíte zvuk otáčení, jej pomalu zasuňte vodorovně do uší, přičemž sací hlava je v rovině s ušima. Při odstranění ušního mazu bude jemně vibrovat, aby přitáhl ušní maz a rychle odsál nečistoty uvnitř ucha do nádobky na nečistoty v přístroji. Také dopřejte svému uchu lepší masáž.

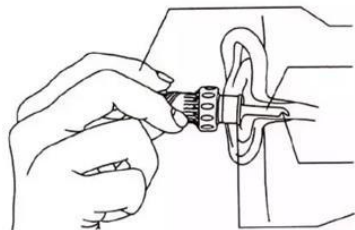

VeźmĚte ěistić uší do ruky vodorovně jako při pouŹívání.

MĚrně zasuňte pĚřisavku pĚřdnĚm koncem do ucha, nĚkolikrăt pohybuje tam a zpĚt, ušní maz lze snadno odstranit.

*Ušní maz je absorbován v pĚřdnĚ části pĚřisavky.

Při ěištĚnĚ ušního mazu musí bĚt pĚřisavka zasunuta do ucha ve sprĂvnĚ poloze.

POZOR: aby nedošlo k poranění ucha, nezasunujte do ucha prosím příliš hluboko.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Filtr může být vyjmut a omyt vodou, stejně jako přísavka.
- V některých případech je sundání filtru obtížné.
- Pamatujte, že ostatní části s výjimkou filtru a přísavky se nemyjí vodou.



Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s domácím smíšeným odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použitý produkt, využijte možnosti vrácení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.