

ATEMSCHUTZMASKE GM2 FFP2 NR.

Produktinformation und Gebrauchsanweisung

Produktnutzen: Filtration der eingeatmeten Luft zum Schutz der Atemwege Gesamtwirkungsgrad: mehr als 95% entsprechend der Klasse FFP2. Es handelt sich um 5-lagige Schutzmasken mit folgenden Schichten: Vliesstoff für die Staubfiltration, doppelt elektrostatischer Filter zum Schmelzen, antiallergische Watte Vliesstoff, hautfreundlicher hypoallergener Vliesstoff. Das Produkt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Die innere Wangenschicht ist hypoallergen und angenehm zu tragen. Die äußere Deckschicht aus Vlies gewährleistet die Filtrationseffizienz gegen Staubpartikel. Beide innliegende Schichten sind schmelzgeblasene Teile des elektrostatischen Filters und bieten eine Filtration mit einem Wirkungsgrad von $\geq 95\%$ (Schutz gegen Viren, Bakterien, Staub und Tröpfchen). Unsere Atemschutzmaske hat eine universelle Größe. Ausrüstung und Positionierung: Nasenbügel aus Draht mit Formgedächtnis zum Abdichten der Schutzmaske um die Nase. Gummibänder zur Befestigung hinter den Ohren oder mittels Kunststoffclip auf der Oberseite des Kopfes. Die verwendeten Materialien sind zertifiziert und können für den beabsichtigten Verwendungszweck garantiert verwendet werden. Im Lieferumfang befindet sich optional als Zubehör ein Kunststoffclip zur möglichen Befestigung der Gummibänder an der Oberseite des Kopfes (Entlastung der Ohren). Der Kunststoffclip ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Es gibt keine Ersatzteile für das Atemschutzgerät GM2 FFP2 NR.

Anweisungen zur Lagerung, Verwendung, Reinigung, Wartung, Einstellung und Desinfektion

Atemschutzmaske GM2 FFP2 NR an einem trockenen Ort bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 50% und einer Temperatur von 10°C bis 30°C. Produkt vor Licht schützen. Die Schutzmaske GM2 FFP2 NR hat herstellenseitig eine Haltbarkeit von 5 Jahren ab Herstellungsdatum (siehe Produktinformation auf der Verpackung)

Die übliche Anwendungsdauer ist auf eine Schicht (d. h. 8 Stunden) beschränkt. Bei Verwendung der Atemschutzmaske in einer mikrobiologisch, stark aktiven Umgebung (Bakterien / Viren), wird die Einsatzzeit deutlich reduziert (bitte daher mehrmals wechseln).

Achtung - Dieses Produkt schützt nicht vor Gasen. Die Sauerstoffmenge in der Umgebung muss während der Verwendung mindestens 17% betragen. Die Atemschutzmaske sollte stets auf glattem, rasiertem Gesicht aufgelegt sein, damit bestmögliche Dichte sichergestellt ist. Das Produkt ist nicht feuerfest und darf daher nicht in offenen und explosionsgefährdeten

CE 1024 - CE-Kennzeichnung mit der Nummer der formal dafür befugten Stelle (Prüflabor), die die regelmäßige jährliche Produktionsinspektion durchführt.

NR - nicht wiederverwendbar - zur einmaligen Verwendung bestimmt

Alle anderen auf der Verpackung verwendeten Markierungen sind harmonisierte grafische Symbole.

Das Inverkehrbringen erfolgte gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686 / EWG des Rates.

Die Konformitätsbewertung CE-1024 wurde formal von einer dafür befugten Stelle durchgeführt: VÚBP, vvi Forschungsinstitut für Arbeitssicherheit, Abteilung für Prüfung und Zertifizierung, Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Prag 1, Tel.: 221 015 811, E-Mail: NB1024@vubp-praha.cz, Web: www.vubp.cz

Verwendete harmonisierte Standards:

EN 149 + A1: 2009 - Atemschutzgeräte - Filterung von Halbmasken zum Schutz vor Partikeln - Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung. Konformitätserklärung siehe www.goodmask.de / www.goodmask.at

Gebrauchsanweisung



Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife oder mit einem hydroalkoholischen Mittel



Überprüfen Sie die Unversehrtheit der Maske und ihrer Verpackung



Öffnen Sie die Maske und identifizieren Sie die Oberseite



Platzieren Sie die Maske über Nase und Mund



Platzieren Sie die Gummibänder hinter die Ohren



Drücken Sie den Nasenclip passend zur Nase zu und überprüfen Sie den festen Sitz der Maske